


Intuitif, et simple

Support barre ou mur pour toute la gamme Biosecuré

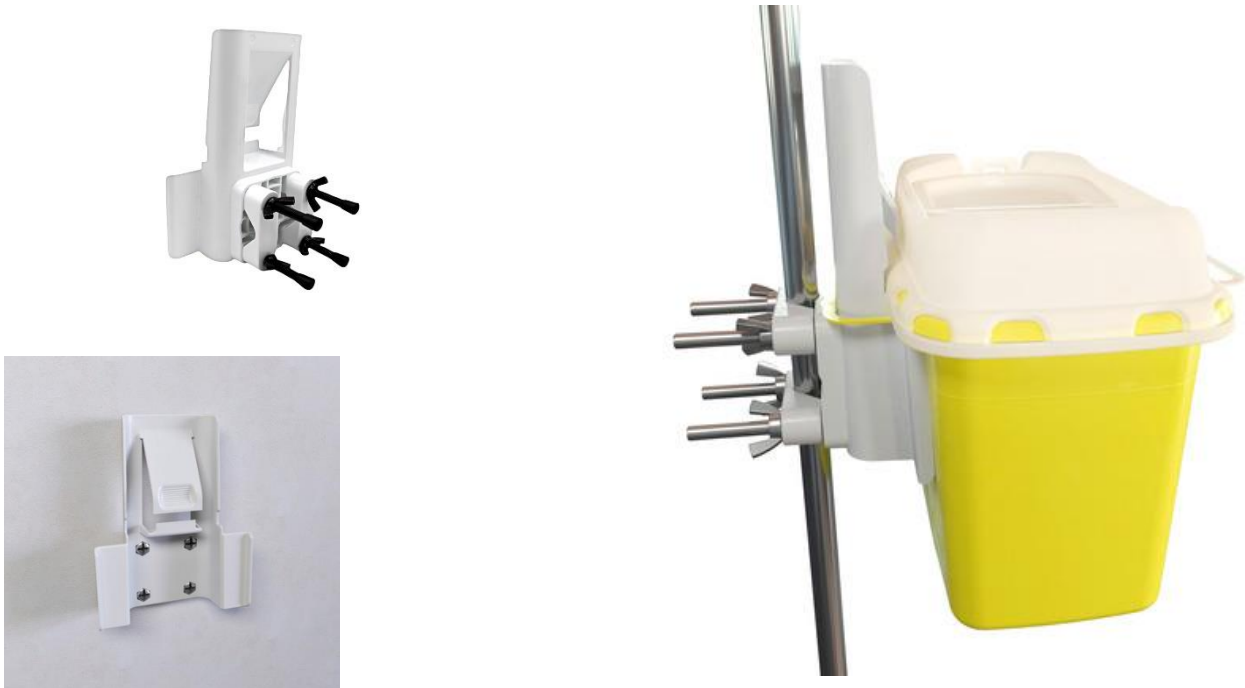

Installation du support barre (Horizontal ou vertical) :

- 1- Insérez les 4 vis fournies
- 2- Placez les deux pièces au chariot et fixez-le en insérant les écrous papillon
- 3- Placez la poignée du conteneur sur le support
- 4- Abaissez le conteneur jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour le fixer

Lien vidéo d'installation : <https://youtu.be/-nOLUb1-SQc?t=98>

Installation murale :

- 1- Percez les trous et utilisez des vis et des chevilles adaptés au type de mur en les vissant jusqu'à ce que le support soit fixé au mur.
- 2- Placez la poignée du conteneur sur le support
- 3- Abaissez le conteneur jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour le fixer

Lien vidéo d'installation : <https://youtu.be/-nOLUb1-SQc?t=121>

Poids unitaire	60 gr
Dimension support	15 x 6 cm
Conditionnement	Vendu à l'unité
Montage	Mural ou sur support barre
Matière	PP copolymère