

TISSUE MANAGEMENT


Decision Tree



Vi har designet våre produkter for behandling av bløtvev slik at de fungerer sammen. Dette betyr at klinikere kan tilpasse behandlingen med utbyttbare produkter og instrumenter, basert på det foreliggende tilfellet. Enten du tar avtrykk, fullfører en klasse V-restaurering eller sementer en restaurering, finnes det et produkt som er bra, bedre og best.

Den endelige beslutningen er naturligvis avhengig av tannlegens preferanse, men dette er våre bruksanbefalinger for vår produktserie for behandling av bløtvev.

TISSUE MANAGEMENT Decision Tree

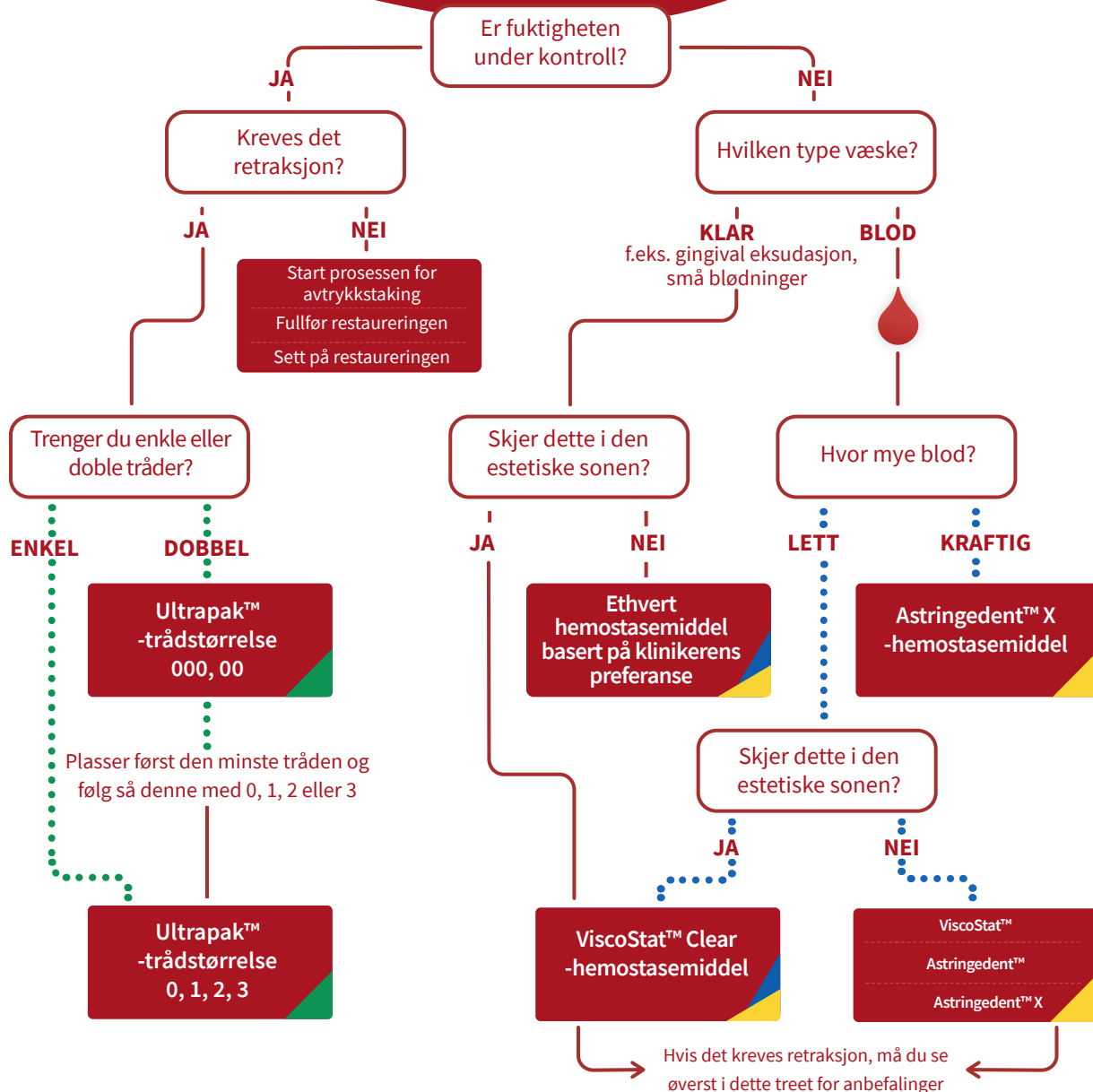

FORKLARING

●●● Indikator for inngnidningsteknikk

Påse at du gnir hemostasemiddelet godt inn i sulcusoverflaten. Et fast trykk gir best effektivitet for det valgte hemostasemiddelet.

●●● Indikator for fukting av tråden

Fukt den første tråden med hemostasemiddel.

▲ Fischer's Ultrapak™ Packers

Spesialkonstruert for å lette leggingen av strikket Ultrapak-tråd. Den tynne kanten hjelper til med å presse inn i tråden, mens de fine tennene reduserer faren for at den glipper ned i og skader gingivale attachment.

▲ Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip

- Brukes når det foreligger ømtålig tilhelende vev eller smertereaksjon.
- Hvis det kun kreves kontroll av sulcusvæske, kan den mykere enden av den blå plastspissen til Dento-Infusor være mer skånsom.

▲ Metal Dento-Infusor™ Tip

- Påfører hemostasemidler på effektivt vis. Passer best ved blødning, særlig kraftig blødning, og til fjerning av overflatekoagel.
- Har en butt, bøyd kanyle med myk «skurebørste» til infundering og rengjøring av traumatisert sulcus.