



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultradent Products

Halo™ Sectional Matrix System



Headline:

HALO™ Sectional Matrix System

Vakre resultater på kortere tid



Product Information

Det brukervennlige Halo seksjonsmatrisesytemet gjør deg i stand til å lage vakre, anatomisk konturerte komposittrestaureringer på kortere tid.

Halo leddelte matrisesytem inkluderer nitinolringer, matrisebånd av rustfritt stål og kiler. Hver av komponentene er utviklet for å brukes sammen for å opprette konsekvente, anatomisk formede restaureringer.

Product Information

Gir konsekvent stramme kontakter, hvilket bidrar til å sikre at restaureringen vil få den lange levetiden både du og din pasient forventer.

Maks separasjon av tennene oppnås gjennom nitinolringens kraft og den aktive kilingen med kilene. Dette ideelle systemet for separasjon gjør deg i stand til å restaurere en enkelt tann eller enkelt utføre back-to-back-restaureringer.

Halo-ringens unike nebbdesign gjør at båndet kan tilpasses helt til prepareringen, fra gingivalranden til randcristaen, og den bidrar til at formen opprettholdes selv i store restaureringer, hvilket igjen bidrar til at du gjennomgående oppnår anatomisk formede restaureringer.

Når restaureringene har ideelle kontakter og anatomiske konturer, vil du oppleve at du bruker mindre tid på utforming og pussing og polering. Halo-systemet gjør det med alle restaureringer.

Hold orden med den unike, brukervennlige carouseldispenseren

Material for Call To Action

Videos:

<https://we.tl/t-CBEgXVcc6O>

Product Images:

<https://we.tl/t-5HGd6a2SY5>

Article:

<https://we.tl/t-XMijaICMsF>

Additional Product Information

Nitinolringer

- Superelastisk nitinol-metall opprettholder kraften under prosedyrer og reduserer materialtretthet
- Ringene kan brukes inntil 1000 ganger
- De glassforsterkede endestykkene bryr ikke lett og bøyes ikke, og vil ikke presses inn i prepareringen og gi underkonturerte restaureringer
- Ringens kontur bevarer båndenes anatomiske og naturlige form og bidrar slik til å eliminere fyllingsoverskudd og redusere nødvendig arbeid med pussing og polering
- Konstruksjon som kan stables gir anledning til bruk i MOD'er og andre klasse II restaureringer
- Gir ideell separasjon for for back-to-back-restaureringer

Product Information

Matrisebånd

- Anatomisk formet for ideelle kontakter
- Kurvaturen langs randcrista gir ideell anatomisk form, hvilket reduserer nødvendig pussing og polering
- Pinsetthull for enkel applisering
- Bøyelege fliker gir anledning til enkel applisering og fjerning med bedre sikt
- Valgfritt belegg for enkel identifisering (teflonbelegg, tykkelse 0,013 mm)
- "Original" båndene gir bedre tilpasningsegenskaper, mens de stivere "Firm" båndene er motstandsdyktige mot deformasjon og ideelle for trange, interproksimale mellomrom
- "Original" båndene og "Firm" båndene er fremstilt av ultratynt 0,038 mm rustfritt stål

Product Information

Kiler

- Faste kiler gir aktiv kiling for bedre separasjon, samtidig som de er mindre traumatiske for papilla
- En hul design gjør plasseringen av kilene enkel, og den gjør det mulig å stable kilene oppå hverandre når det kreves flere kiler
- Farger som enkelt skilles fra hverandre, bidrar til å identifisere kilenes størrelse
- Midtpartiet er ettergivende for anatomisk tilpasning av båndet

Product Information

Carouseldispenser

- Hold orden med den unike, brukervennlige carouseldispenseren
- Slutt på søl og på at bånd og kiler spres utover hvis de faller ned ved et uhell, og dermed spares tid og frustrasjon reduseres
- Kan enkelt desinfiseres med desinfeksjonsmiddel til overflatedesinfeksjon